

Inlay-Onlay

E.MAX®/ ZIRKON*

Inlays-Onlays sind Versorgungen, die den Verlust von Zahnschubstanz wiederherstellen sollen. Sie sind hauptsächlich bei Restaurationen im Seitenzahnbereich indiziert, bei mittleren bis großen Kavitäten.

Ursprünglich hauptsächlich aus Edelmetall hergestellt, werden heute Materialien wie Presskeramik oder Zirkon gefräßt bevorzugt.

*Zirkon Inlay/Onlay nur Protibab International



ÄSTHETIK

- e.max® ist eine hoch lichtdurchlässige Glaskeramik, was ihr eine hohe Ästhetik und Aussehen verleiht.
- Zirkonoxid-Inlays-Onlays haben Ästhetische Ergebnisse, die natürlichen Farbtönen nahe kommen.



TECHNIK

- E.max lässt sich auch im Mund noch gut bearbeiten und nachbessern.
- Zirkon ist um einiges härter, weshalb es auch für den Molarenbereich bevorzugt wird.



BIOKOMPATIBILITÄT

- Hervorragend.



PROTILAB MATERIALIEN*

- e.max® press : IPS e.max® Press – Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein.
- Fullzirkon : DDBioZX² - Dental Direkt - CE0482 - Deutschland.

* Unter Vorbehalt etwaiger Materialänderungen



HINWEIS ZUM GEBRAUCH

IDEALE VORBEREITUNG

- Zahnschubstanzreduzierung zwischen -1.2 und 1,5 mm.
- Die Oberflächenbehandlung der Keramik besteht aus einer Behandlung mit Flusssäure, Spülen und Trocknen und anschließendes Auftragen eines Silans.

DER ABDRUCK

- Digital, Silikone und Elastomere (keine Alginate).

BEFESTIGUNG

- Verklebung für e.max® und Zementieren der Zirkonversorgungen (Kompatibilität, nach Herstellerangaben prüfen).

MEINUNG VON AURELIE, QUALITÄTSKONTROLLE

Die Inlays-Onlays in e.max® sind für mich die perfekte ästhetische Lösung. Die Zirkonoxid-Inlays-Onlays empfehle ich im gesamten Molarenbereich.

