

Datenblatt Kunststoffprothetik

KLASSISCHE PROTHESE ODER PROTIFLEX



Voll- und Teilprothesen ersetzen fehlende Zähne und verbessern Aussprache, Kaeigenschaften und Ästhetik. Sie bestehen aus zahnfarbenen Kunststoffzähnen und rosa Kunststoff bzw. ProtiFlex und sind zur täglichen Pflege herausnehmbar. Bei mangelnder Stabilität einer Totalprothese bieten wir implantatgetragene Lösungen an. ProtiFlex ist ein thermoplastisches Nylon für flexible, komfortable Teilprothesen.



komfort

ProtiFlex:

- Dicke der der Prothese: 2 mm statt 4 bis 5mm und sehr leicht.
- Sehr flexibel, fast unzerbrechlich.
- ProtiFlex-Klammern sind flexibler als Metallklammern (Zahnfreundlicher).



Ästhetik

ProtiFlex:

- Natürliches Aussehen dank guter Transluzenz.
- Nahezu unsichtbare Versorgung.
- Farbe des Kunststoff verändert sich nicht chemisch anhand von Flüssigkeiten in der Mundhöhle.
- Farbstabil über die Zeit. (Kunststoff / ProtiFlex)



Hinweis zum Gebrauch

HAUPTANWENDUNGEN

- Ästhetische herausnehmbare Prothese, geeignet für Monomer-Allergiker (PMMA-frei).
- Prothetische Versorgung nach Implantation, kombinierbar mit Modellguss.

ABDRUCKNAHME

- Valplast-Teilprothese: Alginat oder nach Wahl des Behandlers.
- Klassische Vollprothese (ohne Valplast): Vorabdruck + individueller Löffel mit Silikon.
- Digitaler Abdruck möglich, jedoch durch traditionelle Abformung zur korrekten Darstellung der Weichgewebe zu ergänzen.

NACHTEILE

- ProtiFlex ist laut Hersteller unterfütter- und erweiterbar, jedoch aus unserer Sicht – besonders bei Vollprothesen – nicht zu empfehlen.



Biokompatibilität

ProtiFlex:

- Hervorragende Biokompatibilität.
- Hypoallergen (Allergiker freundlich).
- Gibt keine Polymere frei.
- Metallfreie Lösung (Kunststoff /ProtiFlex)



Protilab Materialien*

- Kunststoffzähne: VITA CE0124
- Material: Valplast CE0050

*Unter Vorbehalt etwaiger Materialänderungen

Meinung von Gregory, Zahntechniker



Kunststoff- oder ProtiFlex-Prothesen werden mit hoch qualitativen Materialien hergestellt. Eine Modellanalyse sowie die präzise Vorarbeit des Zahnarztes und einer Wachseinprobe führen zu optimalen Ergebnissen.

Ihr Zahnarzt wird mit uns die bestmöglich geeignete Lösung für Ihren Zahnersatz finden Lösung.

Gregory, Zahntechniker Protilab