

# Datenblatt

## Ultra-dünne easyfit® veneers\*



Protilab easyfit®-Veneers werden aus einer Lithium Disilikat Glaskeramik hergestellt. Ideal für Zahnärzte, die einfache Lösungen bevorzugen: Sie korrigieren schnell leichte Fehlstellungen und Farbunterschiede. Durch ihre minimale Stärke kann ein Beschleifen oft entfallen – eine effiziente und sichere Option. Die Einsetzung ist unkompliziert und benötigt nur 2 bis 3 Termine. Sie sind widerstandsfähig, stabil und behalten ihren natürlichen Farbton.



### Ästhetik

- Leichte Zahnfehlstellungen sowie Verfärbungen korrigieren.
- Farbstabilität.



### Technik

- Extrem dünne Veneers (ab 0,3 mm) Vermeidung des Beschleifen der Zähne (oder mit einer minimalinvasiven Präparation).
- Sehr abriebfest, stabile und passgenaue.
- Naturgetreue, harmonische Ergebnisse.



### Hinweis zum Gebrauch

#### OPTIMALE VORBEREITUNG

- Im Falle eines Diastemas ist es notwendig, den approximalen Bereich anzupassen, um das Einsetzen der Veneers zu erleichtern.
- Im Falle von Unebenheiten auf der Zahnoberfläche und/oder im Inzisalbereich wird empfohlen, diese bereits bei der Präparation anzupassen.
- Bei Unterkieferzähnen müssen Sie die Inzisalkante um etwa 0,5 mm reduzieren.

#### DER ABDRUCK

- Digitaler Scan, Silikone und Elastomere (keine Alginate).
- Für einen besseren Sitz der Verblendungen wird empfohlen, immer Fäden oder ein geeignetes Ersatzmaterial zu verwenden, um eine perfekte Abformung der Präparationsgrenze zu gewährleisten. Wir empfehlen eine Abformung aus dünnfließendem und mittelviskosem Silikon.

#### FARBNAHME

- Nehmen Sie bitte beide Farben bei der Farbauswahl (Stumpffarbe und gewünschten Zahnfarbe).

#### BEFESTIGUNG

- Variolink® Esthetic bonding.



### Befestigung

- Perfekt in Verbindung mit Variolink® Esthetic bonding.
- Fünf Transluzenzstufen und zusätzliche Impuls-Rohlinge für maximale Flexibilität.
- Einfache Beseitigung von Überschüssen.
- Adhäsive, selbstadhäsive oder konventionelle Befestigung.



### Protilab Materialien\*

- Lithiumdisilikat Glaskeramik: BSM- CE0197

## Meinung von Rosario, Zahntechnischer Leiter



Für mich ist es die perfekte Lösung, um Ästhetik und Schnelligkeit zu verbinden ! Ich empfehle dem Patienten im ersten Schritt ein Wax-Up um vorab einen ersten Eindruck der geplanten Arbeit zu vermitteln. 2 oder 3 Termine sind ausreichend.

Das Ergebnis ist erstaunlich!

Rosario, Zahntechnischer Leiter Protilab

\* Easyfit nur Protilab International