

# Datenblatt Vollkeramik

KERAMIK AUF ZIRKONOXID



Vollkeramik auf Zirkonoxid (verblendet) ist biokompatibel und völlig metallfrei.

Die Kombination aus präzise hergestellten CAD/CAM Zirkonoxidgerüsten und der manuell geschichteten Keramik in Verbindung mit einer hohen Festigkeit und ästhetischem Anspruch, sind die Stärken dieses Materials.



## Ästhetik

- Ästhetische Randgestaltung Geschichtete Keramik ahmt das Original perfekt nach.
- Wahl der Gerüstfarbe in Zirkon.



## Technik

- Hohe Beständigkeit von Zirkondioxid (> 1100 MPa).
- Für Einzelkronen oder kleine bis große Spannbrücken.
- Leicht anzupassen und zu polieren.
- Niedrig abrasive Keramik für den Antagonisten.



## Hinweis zum Gebrauch

### IDEALE PRÄPARATION

- Zahnschubstanzreduzierung zwischen ~ 1,2 und 2 mm.
- Die Präparation der zervikalen Begrenzung kann supra- oder subgingival erfolgen, wobei die subgingivale Präparation für ein besseres ästhetisches Ergebnis empfohlen wird.

### DER ABDRUCK

- Digital, Silikone und Elastomere (keine Alginate).

### BEFESTIGUNG

- Zementieren oder verkleben (Verarbeitung nach Herstellerangaben).



## Biokompatibilität

- Ausgezeichnete Biokompatibilität.
- Gewebeverträglichkeit höher als bei einer VMK.
- Hohe Abrasionsfestigkeit.



## Protilab Materialien\*

- **Keramik:** Hera Ceram Zirconia - Kulzer CE0197
- **Zirkon:** BSM- CE0197

\*Unter Vorbehalt etwaiger Materialänderungen

## Meinung von Tommy, Zahntechniker



Dies ist aus meiner Sicht, die ideale Lösung, um Ihren Patienten von einer metallfreien, ästhetischen Versorgung zu überzeugen.

Indikation Frontzahn- und sichtbarer Seitenzahnbereich

Tommy, Zahntechniker Protilab

